


## INSTALACION DEL SOFTWARE 3DVR



El protocolo para que el software 3DVR funcione es el siguiente:

1º Se debe solicitar a ORTOGNATHOS el ejecutable **3DVR** y la **dll** con el idioma. Ambos ficheros se copian y se pegan en **C:\Archivos de programa\ISIP\iCATVision**, que es donde se copia el software cuando recibe el CD.

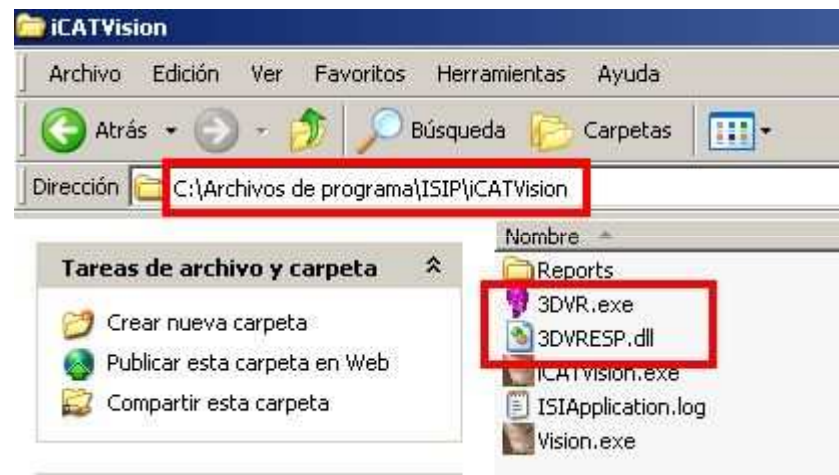

2º Una vez copiados los ficheros en esta carpeta, creamos un acceso directo de esta carpeta en el escritorio.

3º Desde el escritorio, abrimos el software solamente la primera vez. Volvemos a cerrar.

4º Abrimos **i-CAT Vision**, seleccionamos un paciente y abrimos desde aquí **3DVR**, que debe funcionar correctamente en español.